



# アルボース オートディスペンサー



消毒用  
AAD-SG500



手洗用  
AAD-FO500

# AUTO DISPENSER

## 衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減

### 特長

#### 各部説明

##### センサー感知方式

誤作動防止のため、センサーを2回連続で感知してから薬剤を吐出する設定です。又、センサーの感知範囲を極力吐出口付近に限定しています。

##### 開封日ととりかえの目安

正面から確認できます



消毒用 AAD-SG500



手洗用 AAD-F0500

※受皿は付属されておりません。

正面

##### 専用カギ

専用カギを上から差し込んでカバーを開けます。

##### フロントカバー

開ける際に破損や転倒防止のためフロントカバーは徐々に開くように設計されています。また、カバーを開けると本体は作動しなくなります。

##### 液量確認

フロントカバーの側面は薬剤残量が確認できるよう透明になっています。



##### 壁掛けプレート

壁掛けプレートを壁に取り付けた後、本体をセットできます。

##### セキュリティスロット

据置時の盗難防止のためノートPC用のセキュリティワイヤーが使用できるスロットが背面にあります。

##### ECOモード

1時間動作しないと自動でECOモードに切り替わり、待機電力をセーブします。ECOモードでは通常の待機状態に比べて消費電力が約37%になります。

##### ACアダプター用通し穴

背面

##### 吐出量切換スイッチ

薬液の吐出量をフル/ハーフのスイッチで切り替えることができます。(ハーフモードは正確に半量であるものではありません。)

##### 電池カートリッジ

取り外し可能で簡単に電池交換できます。又、ホコリ等も入りにくくなっています。

●電源としてアルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用できます。

##### ジェル用アタッチメント

※AAD-F0500には付属されておりません。

内部

※電池は付属されておりません。

## 待機電力を低減できる省エネ仕様

# スプレー、ジェル、泡の3タイプの薬剤に対応 ボトルごと取り替えもでき、交換が簡単

## 消毒用

SANITIZER

## 手洗用

HANDSOAP

第3類医薬品

第3類医薬品

指定医薬部外品

医薬部外品



速乾性手指消毒剤  
**アルボナースPRO**

幅広い細菌やウイルスに短時間で効果がある速乾性手指消毒剤。保湿剤を配合し手荒れに配慮し、乾燥後はしっとりサラサラな使用感です。

アルコール手指消毒剤  
**アルボナースPROジェル**

幅広い細菌(CREなどの薬剤耐性菌を含む)やウイルス(ノンエンベロープウイルスを含む)、真菌に効果を発揮します。保湿剤を配合し、手荒れに配慮しています。

アルコール手指消毒剤  
**アルボナースジェル**

4種類の保湿剤をバランス良く配合し、ベタつきを抑えサラッとした使用感です。ノンエンベロープウイルスにも効果があります。

泡ハンドソープ  
**弱酸性泡ハンドソープ**

何度も手洗いを繰り返す作業者の手肌に配慮した、肌と同じ弱酸性泡ハンドソープ。しっとりとした洗い上がりです。

薬用泡ハンドソープ  
**ハンドホイップ**

クリーミーな泡で洗浄と同時に殺菌・消毒ができる薬用泡ハンドソープ。さっぱりとした洗い上がりです。

画像は延長ノズルを取り付けた状態です。



スプレー



ジェル



泡

## ●専用ボトルにつめかえて使用できます。

### 専用スプレーボトル

SANITIZER



アルボース手指消毒剤 指定医薬部外品  
**アルボナース**

広範囲の微生物に短時間で効果がある速乾性手指消毒剤。3種類の保湿剤が手に潤いとさらさら・すべすべ感を与えます。消防法上の危険物に該当しない商品です。

アルコール手指消毒剤 指定医薬部外品  
**ハンドアルサワーNL**

一般細菌をはじめノンエンベロープウイルスに対しても不活性化効果があります。食品及び食品添加物に登録されている原料だけを使用しております。

### 専用泡ボトル

HANDSOAP



薬用泡ハンドソープ 医薬部外品  
**ケアマイルド**

すすぎのよい、すっきりとした使用感を実現しました。殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合で、しっかりと殺菌効果を発揮します。保湿性成分配合で手肌につるおいを残します。

純植物性石鹸液 医薬部外品  
**アルボース薬用石鹸iグリーン**

天然植物油脂を主原料とした無香料の純植物性原液使用石鹸液です。豊かな泡立ちで、汚れをすっきり落とします。

## 関連商品



■ オートディスペンサー専用スタンド

■ オートディスペンサー専用受皿




■ オートディスペンサー専用ACアダプター

他にもご使用できる商品がございます。詳細は弊社担当にお問い合わせ下さい。

# アルボース オートディスペンサー

## 製品仕様

### ■外観寸法

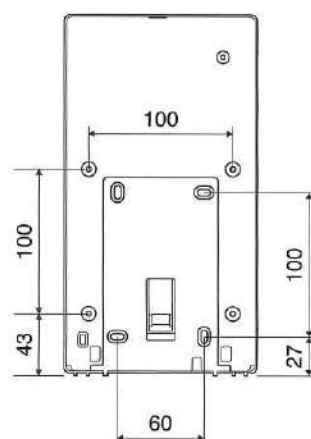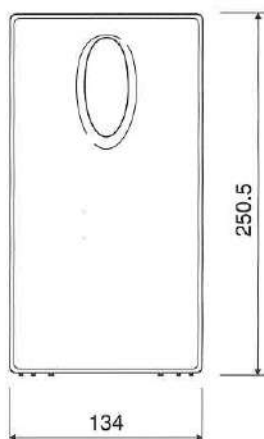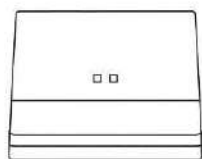

(mm)

項目	内容	
名称	アルボース オートディスペンサー	
型式	消毒用 (sanitizer)	手洗用 (hand soap)
	AAD-SG500	AAD-FO500
荷姿	8台/梱	
使用方法	手のひらを吐出口付近に差し出すと自動で薬液が吐出する	
本体寸法	W:134×D:103×H:251mm	
本体重量	約800g (梱包、付属品、電池、薬液を除く)	
主な材質	本体:ABS樹脂 (内部は一部POM樹脂等を使用)	
電源	アルカリ乾電池、Ni-MH充電電池 (単3形×4本)、DC6V (別売ACアダプター用)	
使用温度湿度範囲	0~40℃、20~85%RH	
付属品	専用カギ、ジェル用アタッチメント (消毒用のみ)、取扱説明書	

商品名	荷姿	単品/サイズ	外装/サイズ	JANコード	ITFコード
<b>■本体</b>					
アルボースオートディスペンサー消毒用AAD-SG500	8台/梱	W:134×D:103×H:251mm	W:477×D:308×H:302mm	4987010-373019	14987010-373016
アルボースオートディスペンサー手洗用AAD-FO500	8台/梱	W:134×D:103×H:251mm	W:477×D:308×H:302mm	4987010-373026	14987010-373023
<b>■関連商品</b>					
オートディスペンサー用受皿	—	W:121×D:162×H: 24mm	—	4987010-374016	14987010-374013
オートディスペンサー用ACアダプター	—	W:78×D:32×H:65mm (コード1.5m)	—	4987010-374023	14987010-374020
オートディスペンサー専用スタンド	—	W:350×D:350×H:1116mm	—	4987010-372111	14987010-372118
オートディスペンサー専用スプレーボトル	—	W:136×D: 62×H:180mm	—	4987010-372012	14987010-372019
オートディスペンサー専用泡ボトル	—	W: 98×D: 61×H:193mm	—	4987010-372029	14987010-372026
<b>■専用薬剤</b>					
アルボナーズPRO500mL (第3類医薬品)	20本/梱	W: 98×D: 62×H:159mm W:115×D: 65×H:197mm (個装箱)	W:480×D:351×H:212mm	4987010-142370	14987010-142377
アルボナーズジェル500mL (ディスペンサー用) (指定医薬部外品)	20本/梱	W:130×D: 61×H:177mm W:135×D: 65×H:180mm (個装箱)	W:685×D:283×H:196mm	4987010-142592	14987010-142599
アルボナーズPROジェル500mL (ディスペンサー用) (第3類医薬品)	20本/梱	W:130×D: 61×H:177mm W:135×D: 65×H:180mm (個装箱)	W:685×D:283×H:196mm	4987010-142899	14987010-142896
ハンドホイップ500mL (ディスペンサー用) (医薬部外品)	24本/梱	W: 98×D: 61×H:193mm	W:400×D:390×H:213mm	4987010-012796	14987010-012793
弱酸性泡ハンドソープ500mL (ディスペンサー用)	24本/梱	W: 98×D: 61×H:193mm	W:400×D:390×H:213mm	4987010-143391	14987010-143398

**NS 長澤紙業株式会社**

<http://www.nagasawa-paper.co.jp>

TEL 088-631-6758

FAX 088-633-1062