

社会医療法人石川記念会 HITO 病院様と共同開発※

ウィルスからの侵入を低減

日本製

※石川ヘルスケアグループ社会医療法人石川記念会 HITO病院
愛媛県四国中央市上分町788-1


マスクにつけられるアイシールド

5月中旬
発売予定!
20枚化粧箱入り
(予定)

いつものマスクに「パッと」カンタン取付!

Point 1

左右の切れ込みに市販のマスクのゴムを通すだけ!

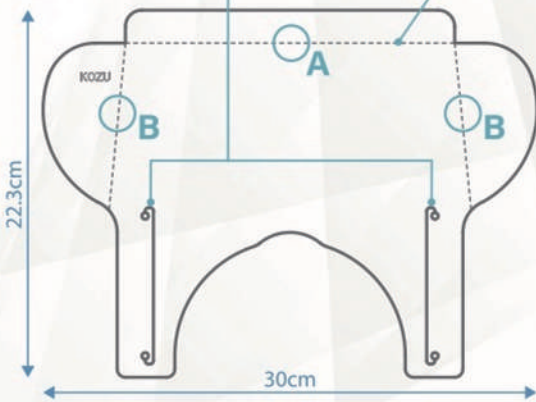

Point 2

Aの罫線を折ることにより曲面が若干、平らになります。
Bの罫線を折ることにより横からの飛沫をさらに守ることができます。
(折らなくても使用できます)



罫線A・Bを折った際の装着イメージ



使い方




- ①「KOZU」の文字が右側にくるように置きます。
※この時文字は反転した状態になっています。
- ②アイシールドの上に市販のマスクを置き、左右の切れ込みにゴムを通します。
- ③マスクを装着し、位置・バランスを調整してください。

製品の特長

- ・左右の切れ込みに市販のマスクのゴムを通すだけの簡単装着。
- ・罫線Aを折ることにより曲面が若干、平らになります。
- ・眼を飛沫、ほこり、油汚れ、煙から保護します。

製品サイズ:約30cm×約22.3cm
材質:PET
JAN:4570088090034

- ・マスクは付属しておりません。
- ・本商品は飛沫感染を低減するためのものであり、完全にウィルスの侵入を防げません。
- ・マスクの素材・形状によっては使用できない場合があります。
- ・車、バイクなど車両の運転時には絶対に使用しないでください。
- ・実環境にてテストを行ってから使用してください。
- ・光の反射により、前が見えづらい場合があります。
- ・マスクの紐が切れると落下する場合があります。

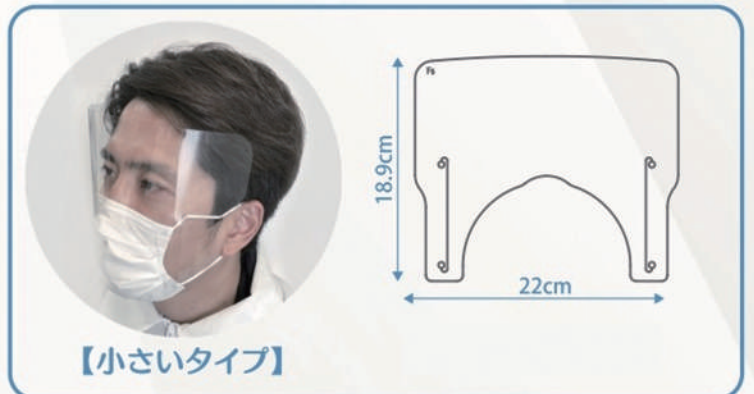

【小さいタイプ】